

器具器械65 歯科用充填器
歯科用輸送、充填及び形成器具
NMGアプリケーションター

*【形状・構造等】

- #1
#2
成分:ステンレス

【性能、使用目的、効果又は効能】

各種形成充填材を窩洞内に輸送・圧接形成、彫刻形成する器具をいう。

【使用上の注意】

- 1) **使用前の注意:** 使用前に必ず洗浄・滅菌(保守・点検に係る事項参照)をする事。
 - 2) **シリコン使用:** 本品はシリコンを使用していますので、他の器具(鋭利な箇所を持つ器具)と一緒に取り扱い際には鋭利な箇所がシリコンに傷をつけたり刺さらないよう十分注意すること。シリコン部に傷がついた際には使用を中止すること。又、シリコン部は長期の使用で退色することがある。
 - 3) **保管上の注意:**
 - ・化学薬品と一緒に収納・保管しない事。
 - ・滅菌後は水気の無い安全な場所に保管する事。
 - 4) **取り扱いについて:** 器具の寿命を著しく低下させるので、粗雑な取扱いはしない事。
 - 5) **目的外使用の禁止:** 使用目的(医療行為)以外の目的で使用しないこと。また、破損、曲がり等の原因になり得るので使用時に必要以上の力(応力)を加えない事。
 - 6) **塩素系・ヨウ素系消毒剤の使用について:** 塩素系及びヨウ素系消毒剤は腐食の原因になるので、使用中に付着した際はできるだけ早めに洗浄する事。
 - 7) **加熱の禁止:** 本品は直接火炎にさらさない事。加熱すると変形、変色、破損等の原因となる。
- 【保守・点検に係る事項】
- 1) **使用前・使用後の点検:** 使用前・使用後に、破損、ヒビ、傷、変色、腐食等の異常がないか確認する事。異常がある場合は使用を中止する事。又、長期の使用により金属疲労や磨耗等の劣化が生じるので、適宜交換する事。
 - 2) **家庭用洗剤の使用禁止:** 家庭用洗剤は金属を腐食させる事があるので、使用しない事。洗浄には歯科器具用防錆洗浄剤を使用する事。
 - 3) **機能水の使用禁止:** 超酸化水(超酸性水)等は、金属を腐食させる事があるので、使用しない事。
 - 4) **洗浄、消毒、滅菌上の注意:**
 - ・次の薬剤は金属腐食を起こす恐れがあるので、使用しない事。塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、次亜塩素酸ナトリウム、ポビドヨード、ホルマリン・フェノール、グルコン酸クロルヘキシジン
 - ・薬液消毒を行う時は、薬剤の添付文書又は取り扱い説明書に書かれた使用上の注意を守ること。薬剤の種類によっては、金属素材に影響を及ぼすことがある。
- ・使用後は、できるだけ早く精製水、防錆洗浄剤を用いて器具に付着した血液、体液、組織片を速やかに除去し、職業感染防止の為に洗浄・消毒する事。
- ・洗浄、消毒、滅菌にはできるだけ精製水を使用する事。水道水を使用すると塩素イオンの影響で器具が腐食する事がある。
- ・加熱滅菌器(オートクレーブ滅菌器等)の乾燥温度に注意する事。高温の乾燥は、器具の鈍り、変形、変色、劣化等の原因となることがある。
- ・洗浄、消毒、滅菌後の器具は水分を除去し、充分乾燥させてから保管する事。水分が付着したまま長時間放置すると、錆び、シミ等の原因となることがある。
- ・洗剤の残留がないよう十分にすすぎをする事。
- ・洗浄装置(超音波洗浄器等)で洗浄する際には、先端同士が接触して損傷することがないように注意をすること。
- ・「もらいさび」を防ぐため、錆びている器具と一緒に滅菌しない事。
- 5) **クレンザー(磨き粉)、金属ウール、金ブラシの使用禁止:** 錆びの原因となるので、洗浄の際、磨き粉や金属ウール・金ブラシは使用しない事。
 - 6) **保管者の限定:** 本品は歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理する事。
- 【包装】
- 各種1個入包装
- *【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】
- | | |
|---------|----------------|
| 製造販売業者名 | 株式会社日進工 |
| 住所 | 東京都北区昭和町2-14-3 |
| TEL | 03-3893-0414 |
| 製造業者名 | 株式会社日進工 |
| 住所 | 東京都北区昭和町2-14-3 |

器具器械65 歯科用充填器
歯科用輸送、充填及び形成器具

NMGコーディングインスツルメント

*【形状・構造等】

#3
成分:ステンレス

・使用後は、できるだけ早く精製水、防錆洗浄剤を用いて器具に付着した血液、体液、組織片を速やかに除去し、職業感染防止の為に洗浄・消毒する事。

【性能、使用目的、効果又は効能】

各種形成充填材を窩洞内に輸送・圧接形成、彫刻形成する器具をいう。

・洗浄、消毒、滅菌にはできるだけ精製水を使用する事。水道水を使用すると塩素イオンの影響で器具が腐食する事がある。

【使用上の注意】

1) **使用前の注意:** 使用前に必ず洗浄・滅菌(保守・点検に係る事項参照)をする事。

・加熱滅菌器(オートクレーブ滅菌器等)の乾燥温度に注意する事。高温の乾燥は、器具の鈍り、変形、変色、劣化等の原因となることがある。

2) **シリコン使用:** 本品はシリコンを使用していますので、他の器具(鋭利な箇所を持つ器具)と一緒に取り扱う際には鋭利な箇所がシリコンに傷をつけたり刺さらないよう十分注意すること。シリコン部に傷がついた際には使用を中止すること。又、シリコン部は長期の使用で退色することがある。

・洗浄、消毒、滅菌後の器具は水分を除去し、充分乾燥させてから保管する事。水分が付着したまま長時間放置すると、錆び、シミ等の原因となることがある。

・洗剤の残留がないよう充分にすすぎをする事。

3) **保管上の注意:**

・化学薬品と一緒に収納・保管しない事。

・洗浄装置(超音波洗浄器等)で洗浄する際には、先端同士が接触して損傷することがないように注意すること。

・滅菌後は水気の無い安全な場所に保管する事。

・「もらいさび」を防ぐため、錆びている器具と一緒に滅菌しない事。

4) **取り扱いについて:** 器具の寿命を著しく低下させるので、粗雑な取扱いはしない事。

5) **クレンザー(磨き粉)、金属ウール、金ブラシの使用禁止:** 錆びの原因となるので、洗浄の際、磨き粉や金属ウール・金ブラシは使用しない事。

5) **目的外使用の禁止:** 使用目的(医療行為)以外の目的で使用しないこと。また、破損、曲がり等の原因になり得るので使用時に必要以上の力(応力)を加えない事。

6) **保管者の限定:** 本品は歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理する事。

6) **塩素系・ヨウ素系消毒剤の使用について:** 塩素系及びヨウ素系消毒剤は腐食の原因になるので、使用中に付着した際はできるだけ早めに洗浄する事。

【包装】

1個入包装

7) **加熱の禁止:** 本品は直接火炎にさらさない事。加熱すると変形、変色、破損等の原因となる。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者名 株式会社日進工
住所 東京都北区昭和町2-14-3
TEL 03-3893-0414

製造業者名 株式会社日進工
住所 東京都北区昭和町2-14-3

【保守・点検に係る事項】

1) **使用前・使用後の点検:** 使用前・使用後に、破損、ヒビ、傷、変色、腐食等の異常がないか確認する事。異常がある場合は使用を中止する事。又、長期の使用により金属疲労や磨耗等の劣化が生じるので、適宜交換する事。

2) **家庭用洗剤の使用禁止:** 家庭用洗剤は金属を腐食させる事があるので、使用しない事。洗浄には歯科器具用防錆洗浄剤を使用する事。

3) **機能水の使用禁止:** 超酸化水(超酸性水)等は、金属を腐食させる事があるので、使用しない事。

4) **洗浄、消毒、滅菌上の注意:**

・次の薬剤は金属腐食を起こす恐れがあるので、使用しない事。塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、次亜塩素酸ナトリウム、ポビドヨード、ホルマリン・フェノール、グルコン酸クロルヘキシジン

・薬液消毒を行う時は、薬剤の添付文書又は取り扱い説明書に書かれた使用上の注意を守ること。薬剤の種類によっては、金属素材に影響を及ぼすことがある。